

Benutzerhinweise Medizinischer Ultraschall Sondenschutz

Sehr geehrter Kunde !


Damit Sie effektiv und vor allem Artefakt-frei mit unseren Schallsonden Überziehern arbeiten können, haben wir einige wichtige Aspekte zur Nutzung hier zusammengefasst. Diese Hinweise gelten für alle von uns angebotenen Größen. Hierbei ist zu beachten, dass eine eventuelle Faltenbildung bei breiteren Überziehern zu keinerlei Artefakte oder Bildverzerrung führt. Ihre diagnostische Aussagekraft bleibt in jedem Fall voll erhalten!



Unsere Ultraschall Schutzhüllen passen auf alle gängigen Ultraschallsonden im Bereich der Urologie, Proktologie, Urogynäkologie etc.

Sie können für Ihre Untersuchungen unterschiedliche Größen wählen.

Die Schutzhülle muss dabei nicht exakt denselben Durchmesser Ihrer Ultraschallsonde aufweisen!

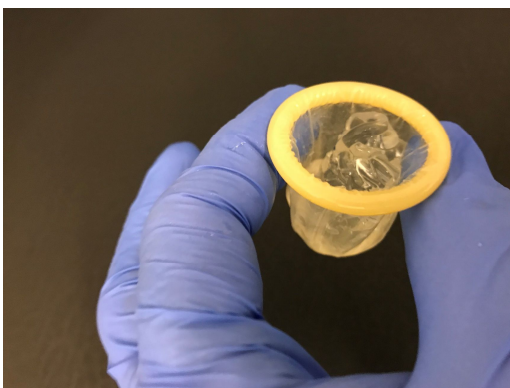


Sie können also problemlos breitere Schutzhüllen verwenden!

Als erstes rollen Sie den Überzieher ein wenig auf und füllen ihn mit dem Ultraschallgel. Hierbei gilt je breiter der Überzieher und schmäler die Ultraschallsonde, desto mehr Gel müssen Sie einfüllen. Dabei halten Sie den Überzieher leicht zwischen Ihren Fingern.



Danach legen Sie den gefüllten Überzieher auf die Spitze der Ultraschallsonde. Achten Sie darauf, dass kein Ultraschallgel aus der Schutzhülle austritt.

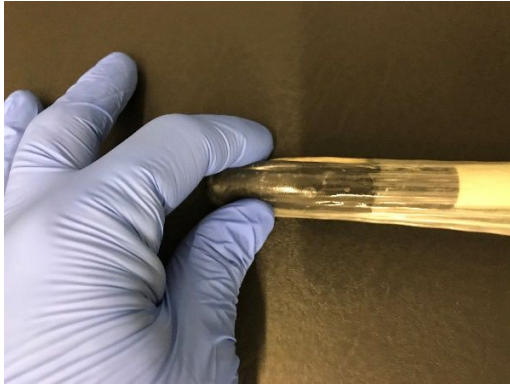

Nun entrollen Sie den Überzieher mit Ihren Fingern, und verstreichen das Ultraschallgel komplett auf den Bereich der Sonde, der für die Bildaufnahme zuständigen Kristalle enthält.

Dabei sollten Sie möglichst alle eventuell entstandenen Luftblasen ausstreichen.



Sobald Sie den Arbeitsbereich der Sonde mit dem Ultraschallgel abgedeckt haben, ist diese bereit für die Bildaufnahme. Die Abdeckung der restlichen Anteile der Schallsonde mit dem Ultraschallgel ist nicht mehr notwendig.



Falls Sie jetzt noch Falten in der Schutzhülle finden, seien Sie bitte unbesorgt!

Diese haben keinerlei Einfluss auf die Bildgebung. Das Material wurde ausgiebig getestet. Es finden sich keine Artefakte durch Falten, unabhängig von dem Überzieher - Durchmesser.

Sollten Sie weitere Fragen zur Benutzung unserer Schutzhüllen haben, sprechen Sie uns einfach an!
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

